整備不良は大事故につながります!!

公共施設

福祉施設

商業施設



車いすを使用している施設を対象に点検を実施したと ころ、多数の施設で所有台数の8割強が車いすの安全 基準を満たしていないという驚きの結果が出ました。



某施設の点検記録より※乗いす86台所有

不良箇所	比率	影響		
タイヤの圧不足	52%	使用者の駆動力負担になり ブレーキ効きに影響		
アームレストのネジ部不良	20%	体幹の不安定や移乗時に危険		
フットレスト部不良	20%	乗降時の転倒事故		
フレームのゆがみ・サビ	17%	座位の不安定化や駆動効率の低下		
シート破れ	12%	体の変形や痛み		

その他、ワイヤー異常・異音etc

点検・整備を **尾施したとこ**

不良箇所が大きく低下し管理の行き届いた 車いすを安全に提供する事ができた。

職員の管理に対する認識も向上。

古い機種から最新の機種まで

安全・快適にお使いいただくために…。

お気軽にお問い合わせ下さい。お見積もり(無料)

A スポット点検 (1回)

点検・整備を1回のみ行います。

B年間メンテナンス

6ヶ月ごとに点検を行います。 急なトラブルにも対応。 年間契約により、不良箇所の減少や 管理意識も向上します。

裏面のFAX用紙にてお問い合わせ、お申込できます







車いすメンテナンスの流れ

分解

整備 🥜

消毒

全ての点検終了後、 殺菌消毒をしてお渡

□ 福祉用具相談員在籍□ 車いす安全整備士

株式会社 アイオート | TEL.0299-83-4612 | 住所/茨城県鹿嶋市佐田1323-1 FAX.0299-83-4617 | URL / http://i-auto.jp/

送信方向

車いす点検受付用紙

FAX:0299-83-4617

24時間 FAX受付

下記ご記入の上このままご送信ください。折り返しご連絡いたします。(日曜は除く)

					台
				I .	
					台
					台
修理及び症状	Č		ご	原検・整備	
			望しま	お見積もり希望	
フリガナ					
事業者名					
ご住所					
TEL		ご担]当者様		
	フリガナ 事業者名 ご住所	事業者名	フリガナ 事業者名 ご住所	フリガナ 事業者名 ご住所	フリガナ 事業者名 ご住所 「お見積もり希望 都道 府県

車いすの日常点検していますか?

毎日安心してお乗り頂くために日常点検が大切です。

グリップ

タイヤの空気圧は 適正ですか?

目安として指で強く押し、やや固いぐらいです。適正でない場合 乗り心地だけでなくタイヤや チューブの傷みも早くなってしまいます。



タイヤの溝はありますか?


満が擦り減るとパンクしやすく、 走行性やブレーキの効きも悪く なります。溝があってもサイド のひび割れや変形がある場合 は早めの交換が必要です。



ブレーキは確実に効いてますか?

ブレーキ本体の不具合や取付不 良は大変危険です。またワイヤー がのびると効きが弱くなるので調 整が必要です。



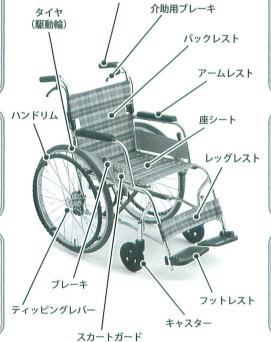

車輪やキャスターは スムーズですか?

髪の毛やゴミ等を巻き込み駆動が重く、スムーズに回らなくなります。分解整備で驚く程スムーズになります。



変な音は出ていませんか?

異音はトラブルのシグナルです。 グリス切れやネジの不具合など 様々な原因が考えられ重大な トラブルにならいないうち対処 が必要です。



車いすはまっすぐ走りますか?

フレームの変形が原因の場合そのままにしてしまうと修理不能 やフレームの破損など大きな事故につながります。



(社)全国総合福祉車両協議会優良登録店

- □ 福祉用具相談員在籍
- 車いす安全整備士

株式会社 アイオート

住所/茨城県鹿嶋市佐田1323-1 TEL.0299-83-4612 FAX.0299-83-4617 URL/http://i-auto.jp/